



CELLER[®]


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Select an application 

 Controller

 Mat

 Mat + Controller

Definice

VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

POZOR: Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může vést k poškození zařízení.

POZNÁMKA: Používá se k upozornění na důležité informace, které je třeba při používání dodržovat.

Obsah

Definice.....	1
Důležité bezpečnostní informace.....	2
Účel použití	4
Obsah balení	4
Nabíjení CELLER8®	5
Nastavení CELLER8®	6
Vytvoření vlastního programu CELLER8®	13
Nabídka nastavení	14
O programech CELLER8®	17
Péče o zařízení a údržba	18
Odstraňování problémů	18
Technické informace CELLER8®	19
CELLER8® + CELLER8® Mat Technická specifikace	20
Seznam symbolů CELLER8®	22
Informace o záruce a vrácení	24
Odpovědný výrobce a kontakty.....	25

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození CELLER8[®], CELLER8[®] Mat či jiného majetku. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené informace.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte produkty CELLER8[®], pokud máte kardiostimulátor, ICD nebo jiné elektrické implantáty.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič není vhodný pro děti mladší 12 let.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo ke zranění zapletením, udržujte kabely při používání v pořádku.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k poruchám krevního oběhu, zajistěte, že popruhy nejsou upevněny příliš pevně.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze schválený AC nabíjecí adaptér dodaný s produkty CELLER8[®] a zajistěte, že je zapojen do bezpečné a snadno přístupné zásuvky. Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění, ztrátu výkonu a poškození produktu CELLER8[®] nebo CELLER8[®] Mat. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím neschváleného příslušenství.

VAROVÁNÍ: Neotevírejte produkty CELLER8[®] ani se nepokoušejte o jejich opravu. Demontáž může vést k poškození výrobku a zranění.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte produkty CELLER8[®] nebo CELLER8[®] Mat v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou otevřený oheň, radiátory, ohříváče či vyhřívané přikrývky. Může dojít ke zranění a poškození zařízení. Provozní teploty najdete v technické specifikaci.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenáte jakoukoli nežádoucí reakci při používání produktů CELLER8[®], okamžitě přestaňte s používáním a poradte se s lékařem.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte produkty CELLER8[®], pokud jsou viditelné známky poškození.

VAROVÁNÍ: U zranitelných osob je při používání výrobku nutný dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání. To zahrnuje osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

POZOR: Za žádných okolností nesmí být produkty CELLER8[®] nebo CELLER8[®] Mat ponořeny do tekutin nebo vystaveny postříkání.

UPOZORNĚNÍ: Používejte s produkty CELLER8[®] pouze originální příslušenství CELLER8[®]. Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit ztrátu výkonu a poškození produktů CELLER8[®] nebo CELLER8[®] Mat. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neschváleným příslušenstvím.

POZOR: K čištění produktů CELLER8[®] používejte pouze neabrazivní hadřík. Použití jiných čisticích prostředků nebo postupů neschválených výrobcem může vést k poškození a snížení výkonu CELLER8[®] nebo CELLER8[®] Mat.

POZOR: Nikdy neskladujte podložku CELLER8® nebo CELLER8® ve vozidle za extrémně chladného nebo horkého počasí. Rozsah skladovacích teplot a vlhkosti najdete v technické specifikaci.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neskladujte CELLER8® po delší dobu s vybitou baterií.

POZNÁMKA: Produkty CELLER8® nejsou zdravotnické prostředky a neměly by nahrazovat odborný lékařský posudek. Nejsou určeny k léčbě, zmírnění nebo prevenci jakéhokoli zdravotního stavu. Před rozhodnutím týkajícím se vašeho zdraví se poraďte se svým lékařem.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že produkty CELLER8® jsou používány v doporučeném rozsahu provozních teplot a vlhkosti, který je uveden v technické specifikaci.

POZNÁMKA: Pokud je během vlastního programu nastavena frekvence na 40 Hz nebo vyšší, zajistěte, že CELLER8® je připojen k elektrické síti, protože samotná baterie tuto frekvenci nepodporuje.

POZNÁMKA: Po vypnutí zařízení se neuloží žádné změny přednastavených programů.

POZNÁMKA: Na konci relace s nočním programem se neozve žádný zvuk, aby se minimalizovalo rušení uživatele.

POZNÁMKA: Pokud zvolíte aplikaci CELLER8® Mat před jeho připojením k CELLER8®, zobrazí se upozornění "Mat Not Connected."

Účel použití

CELLER8® je neinvazivní zařízení s pulzním elektromagnetickým polem (PEMF) určené k použití jako lokalizovaná aplikace PEMF nebo k napájení nebo spolu s podložkou CELLER8® pro aplikaci PEMF na celé tělo.

Podložka CELLER8® a CELLER8® poskytuje magnetickou terapii pomocí elektromagnetických polí generovaných měděnými cívkami a používá se ke zlepšení celkové kondice jako součást zdravého životního stylu.

CELLER8® je určen pro jednoho uživatele a neměly by jej používat osoby mladší 12 let.

Obsah balení



Sada CELLER8® může obsahovat následující položky:

1. CELLER8®
2. CELLER8® Podložka (prodává se samostatně)
3. AC napájecí adaptér
4. Elastický popruh
5. Rychlý průvodce
6. Taška CELLER8®
7. CELLER8® Taška s podložkou (součástí CELLER8® Podložka)


Nabíjení CELLER8®

1. Nabíjecí port
2. CELLER8® Podložka Port



Chcete-li nabíjet CELLER8®, připojte dodaný předem schválený AC napájecí adaptér do nabíjecího portu (1) CELLER8®.

Poté připojte AC napájecí adaptér do elektrické sítě.

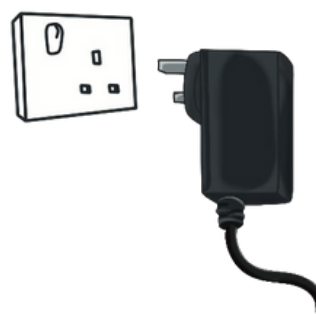

VAROVÁNÍ: Používejte pouze předem schválený AC nabíjecí adaptér dodávaný s produkty CELLER8® a zajistěte, aby byl zapojen do bezpečného a snadno přístupného síťového zdroje. Upozorňujeme, že příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění, ztrátu výkonu a poškození podložky CELLER8® nebo CELLER8®. Záruky na produkt se nevztahují na selhání produktu nebo poškození vyplývající z použití s neschváleným příslušenstvím.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli možnému zranění zaplacením, udržujte kabely při používání v pořádku.


CELLER8® Vypnuto

Když je CELLER8® vypnutý a zapojený do sítě, CELLER8® se bude nabíjet a na obrazovce se objeví animovaná baterie.



CELLER8® Zapnuto

Když je CELLER8® zapnutý a zapojený do sítě, CELLER8® se bude nabíjet a stav baterie najdete v pravém horním rohu.

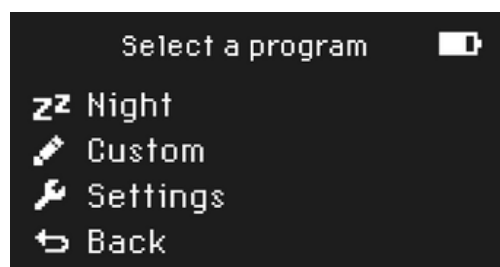

Nastavení CELLER8®


Rozložení CELLER8®

1. CELLER8® obrazovka
2. Ovládání kolečko



CELLER8® + CELLER8® Podložka rozložení

1. CELLER8®
2. Popruh
3. AC napájecí adaptér
4. CELLER8® podložka - kabel
5. CELLER8® podložka

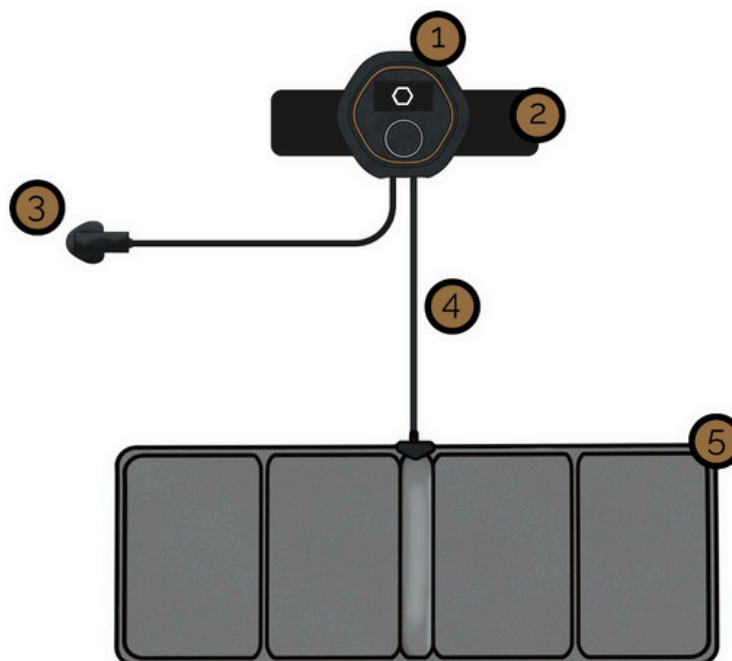

Zapnutí/vypnutí CELLER8®

Chcete-li CELLER8® zapnout, stiskněte ovladač na 2 sekundy. Na obrazovce se objeví animace, po ní obrazovka Menu a ovládací kolečko se rozsvítí, což znamená, že je CELLER8® zapnutý.

Chcete-li CELLER8® kdykoli vypnout, podržte ovladač na 3 sekundy, dokud nezhasnou světla a obrazovka, což znamená, že zařízení je nyní vypnuto.

Zařízení má také funkci automatického vypínání. Pokud je zařízení na obrazovce Menu a po dobu 60 sekund nedojde k žádné aktivitě, automaticky se vypne. Zařízení se také automaticky vypne na konci programu.

Navigace v CELLER8®

CELLER8® má ovládací kolečko, které umožňuje rychlou a snadnou navigaci CELLER8®. Chcete-li se pohybovat v nabídkách CELLER8®, lze ovládací kolečko otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček pro pohyb nahoru a dolů. Ovládací kolečko je také tlačítko potřebné k provedení a potvrzení výběru. Chcete-li použít tlačítko, stiskněte střed ovládacího kolečka, uslyšíte cvaknutí.

Nastavení popruhu

CELLER8® je dodáván s vyhrazeným elastickým páskem, který pomáhá udržet CELLER8® na místě při použití pro lokalizované aplikace.




Chcete-li nastavit, protáhněte popruh přes sponu na zadní straně CELLER8®.

Přidržte CELLER8® na místě a obtočte elastický pásek kolem oblasti těla. Zajistěte popruh pomocí suchého zipu. CELLER8® a popruh by měly být přilnutý, ale pohodlný.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli možnému zranění při špatné cirkulaci, ujistěte se, že popruhy nejsou upevněny příliš pevně.


Příklady CELLER8® a popruhů

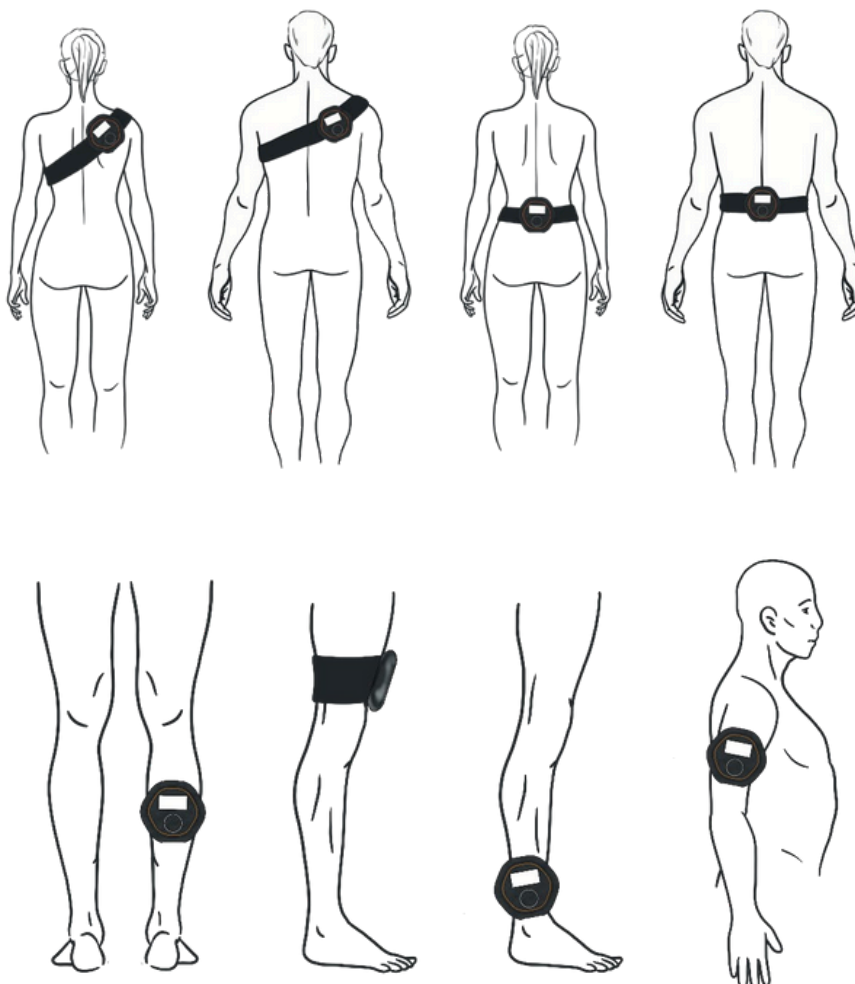

Nastavení podložky CELLER8® Mat

CELLER8® lze použít spolu s podložkou CELLER8® pro aplikaci PEMF na celé tělo.

CELLER8® lze použít jako ovladač pro podložku CELLER8® nebo jej lze použít současně pro celotělovou i lokalizovanou aplikaci PEMF, jak je znázorněno níže.

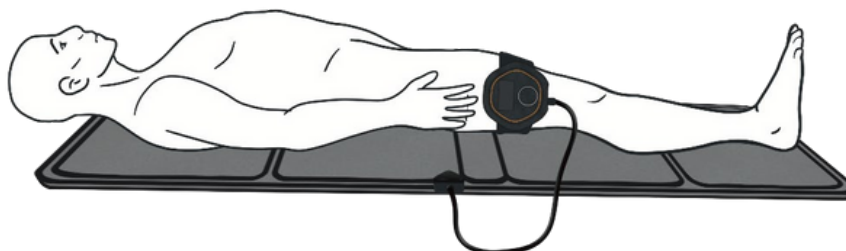

CELLER8® lze používat s podložkou CELLER8® na baterie i ze sítě. Když se podložka CELLER8® používá, měla by být zcela rozložená.

POZNÁMKA: Pokud je během vlastního programu frekvence nastavena na 40 Hz a vyšší, ujistěte se, že CELLER8® je zapojen do elektrické sítě, protože samotná baterie nemůže podporovat vyšší frekvence.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze předem schválený AC napájecí adaptér dodávaný s produkty CELLER8® a zajistěte, aby byl zapojen do bezpečného a snadno přístupného síťového zdroje. Upozorňujeme, že příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění, ztrátu výkonu a poškození podložky CELLER8® nebo CELLER8®. Záruky na produkt se nevztahují na selhání produktu nebo poškození vyplývající z použití s neschváleným příslušenstvím.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli možnému zranění zapletením, udržujte kabely při používání v pořádku.

Chcete-li použít podložku CELLER8® s CELLER8®, zapojte kabel k podložce CELLER8® do portu CELLER8® podložka Port (2).




Výběr aplikace CELLER8®

Když je CELLER8® zapnutý, na obrazovce se zobrazí nabídka aplikací. Existují tři možnosti aplikace:


CELLER8® (Řídicí jednotka)

Aplikace CELLER8® použije lokalizovaný PEMF.

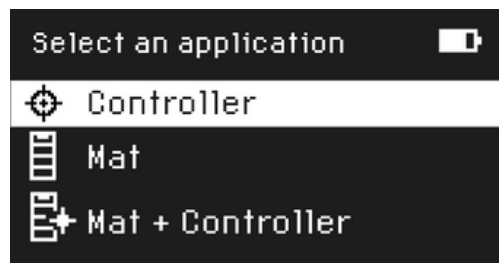

CELLER8® Podložka

Aplikace CELLER8® Mat bude používat pouze CELLER8® Mat k aplikaci celotělových PEMF a musí být zapojena do CELLER8®, aby mohla být použita. V tomto režimu bude vydávat PEMF pouze podložka CELLER8®. Před výběrem této možnosti se prosím ujistěte, že je podložka CELLER8® připojena k CELLER8®.

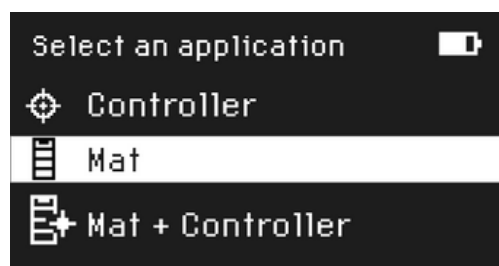

CELLER8® Podložka + CELLER8® (ovladač)

Aplikace CELLER8® Mat + CELLER8® umožňuje CELLER8® Mat aplikovat PEMF na celé tělo, ale také používá CELLER8® k současné aplikaci lokalizovaného PEMF. Jak CELLER8® Mat, tak CELLER8® budou v tomto režimu emitovat PEMF. Před výběrem této možnosti se prosím ujistěte, že je podložka CELLER8® připojena k CELLER8®.



POZNÁMKA: Pokud vyberete aplikaci pomocí CELLER8® Mat před připojením CELLER8® Mat k CELLER8® se objeví obrazovka Mat Not Connected (podložka není připojena).



Pokud tato chyba přetrvává, přečtěte si část Odstraňování problémů v této příručce.



Pomocí ovladače vyberte požadovanou aplikaci a stisknutím ovladače vyberte.

Výběr programu CELLER8®

Jakmile vyberete požadovaný aplikátor, objeví se programové menu. Na výběr jsou 4 přednastavené programy:

- Ranní
- Večerní
- Meditační
- Noční

Případně se můžete rozhodnout pro vlastní program. Více informací o programech naleznete v této příručce v části O programech CELLER8®.

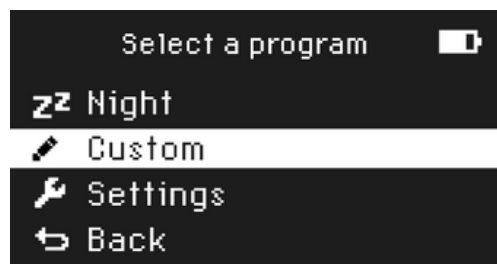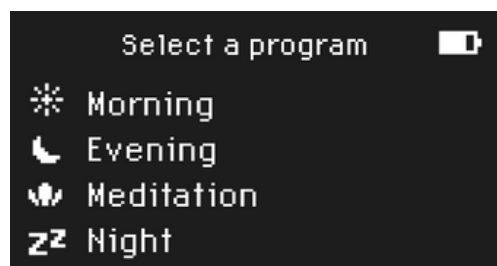

Chcete-li se vrátit do nabídky aplikací, pomocí ovladače přejděte na položku Zpět a stisknutím ovladače se vraťte.

Výběr intenzity a času


Jakmile vyberete jeden z přednastavených programů, lze upravit Intenzitu (sílu magnetického pole) a Čas (délku relace).

Přednastavené programy jsou dodávány s již předem načtenou doporučenou intenzitou a časem. Ty se zobrazí při každém použití zařízení. Tyto lze v případě potřeby změnit.

Chcete-li změnit přednastavenou intenzitu, pomocí ovladače zvýrazněte Intensity. Stisknutím ovládacího voliče otevřete obrazovku nastavení.



Otočením ovladače upravte intenzitu podle potřeby. Stiskněte ovladač pro potvrzení.

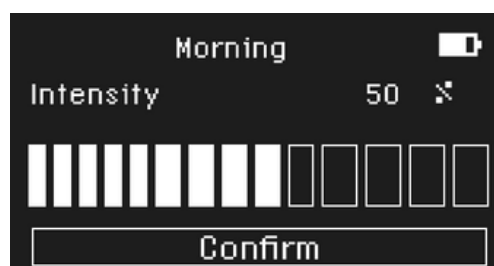


Nastavení	CELLER8® Mat 1	CELLER8® 2 Gauss/
2 %	Gauss/ 100 μ T 2	200 μ T 4 Gauss/
4 %	Gauss/ 200 μ T 5	400 μ T 10 Gauss/ 1
10 %	Gauss/ 500 μ T 10	000 μ T 20 Gauss/ 2
20 %	Gauss/ 1 000 μ T 20	000 μ T 40 Gauss/ 4
40 %	Gauss/ 2 000 μ T 30	000 μ T 60 Gauss/ 6
60 %	Gauss/ 3 000 μ T 04,	000 μ T/001 Gauss,
80 %	40 Gauss	008 Gauss, 008 08
100 %	50 Gaussů/ 5 000 μ T	000 μ T


Lokalizovaný CELLER8® bude dosahovat intenzit až 100 Gaussů (10 000 Microtesla).

Celotělová podložka CELLER8® bude dosahovat intenzit až 50 Gaussů (5 000 mikrotesla).

Chcete-li změnit čas, pomocí ovladače zvýrazněte Čas. Stisknutím ovládacího voliče otevřete obrazovku nastavení.

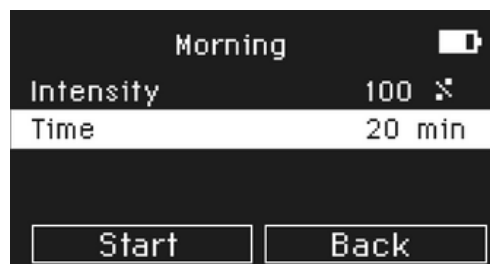


Otočením ovladače upravte čas podle potřeby. Stiskněte ovladač pro potvrzení.

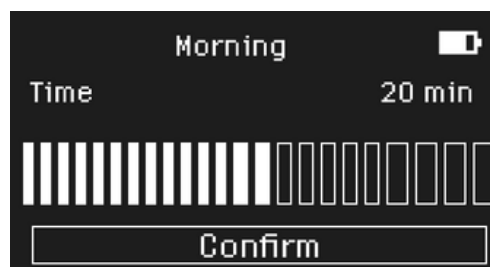

Pokud jsou upraveny přednastavené hodnoty Intensity a/nebo Time, objeví se tato obrazovka s novými hodnotami.


Chcete-li spustit program, ujistěte se, že je pomocí ovladače zvýrazněno Start, a stisknutím ovladače spusťte program.

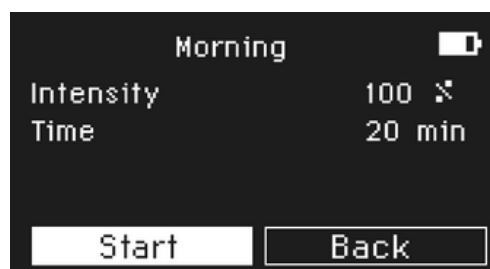

Chcete-li provést jakékoli změny, zvýrazněte tlačítko Zpět a stisknutím ovladače se vraťte o krok zpět.

POZNÁMKA: Žádné změny přednastavených programů nebudou zapamatovány po vypnutí zařízení.

Po spuštění programu se na obrazovce objeví informace o běžícím programu.

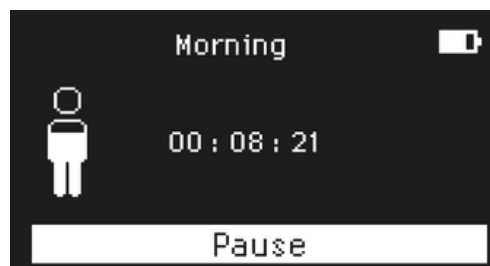

Vybraný program se objeví v horní části obrazovky a časovač začne odpočítávat. V levé části obrazovky se objeví animace těla k dobití.

Tato obrazovka po 15 sekundách ztmavne jako funkce úspory energie.

Chcete-li program pozastavit, stiskněte ovladač; stiskněte jednou, pokud je obrazovka aktivní, nebo dvakrát, pokud je obrazovka ztmavená. Zobrazí se výzva s možností zastavit nebo obnovit program. Má-li být program po přestávce obnoven, použijte ovladač pro zvýraznění položky Resume a ovladač pro obnovení aktuální relace.

Chcete-li program předčasně ukončit, ujistěte se, že je zvýrazněno Stop, a stisknutím ovládacího kolečka ukončete aktuální relaci a zařízení se vrátí na obrazovku nabídky.



Jakmile skončí relace PEMF, relaci uzavře krátká animace. Pokud je v nastavení aktivován zvuk, ozve se také bzučák. Zařízení se poté automaticky vypne.


POZNÁMKA: Na konci relace s nočním programem se nepřehraje zvuk, aby se omezilo rušení uživatele.

Vytvoření vlastního programu CELLER8®

Vytvoření vlastního programu je podobné jako při změně parametrů v přednastavených programech, ale vlastní program spustí pouze jednu frekvenci, která byla zvolena pro celou relaci.

POZNÁMKA: Pokud je během vlastního programu frekvence nastavena na 40 Hz a vyšší, ujistěte se, že CELLER8® je zapojen do elektrické sítě, protože samotná baterie nemůže podporovat vyšší frekvence.

Po výběru režimu aplikace z nabídky aplikací vyberte z nabídky programů vlastní program.

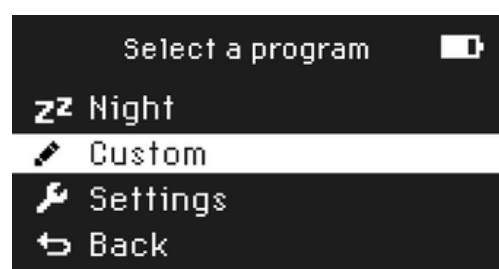

Pomocí vlastního programu lze přizpůsobit intenzitu, čas a frekvenci.

Chcete-li změnit parametr, zvýrazněte jej pomocí otočného ovladače a poté otočným ovladačem otevřete obrazovku nastavení. Otočením ovladače upravte čas podle potřeby. Stiskněte ovladač pro potvrzení.





Jakmile jsou parametry pro uživatelský program vytvořeny a potvrzeny, objeví se obrazovka s novými hodnotami.


POZNÁMKA: Jakékoli změny ve vlastním programu se projeví být zapamatován, jakmile bylo zařízení vypnuto v paměti jako naposledy použité Vlastní program.

Stejně jako u přednastavených programů se na obrazovce objeví informace o běžícím programu.

Vybraný program se objeví v horní části obrazovky a časovač začne odpočítávat. V levé části obrazovky se objeví animace těla k dobití.

Tato obrazovka po 15 sekundách ztmavne jako funkce úspory energie.

Jakmile skončí relace PEMF, relaci uzavře krátká animace. Pokud je v nastavení aktivován zvuk, ozve se také bzučák. Zařízení se poté automaticky vypne.

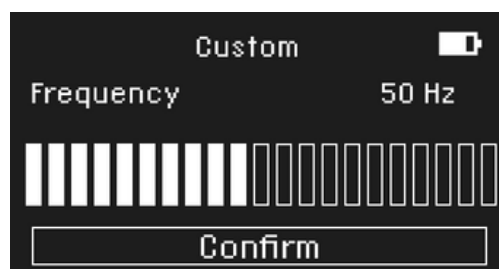


Nastavení menu

V nabídce Program pomocí ovladače přejděte do nabídky Nastavení.

Stisknutím na ovladači otevřete nabídku Nastavení.

V nabídce Nastavení lze povolit/zakázat zvuk a změnit polaritu produktů CELLER8®.

Nabídka Nastavení také zobrazuje aktuální verzi firmwaru.

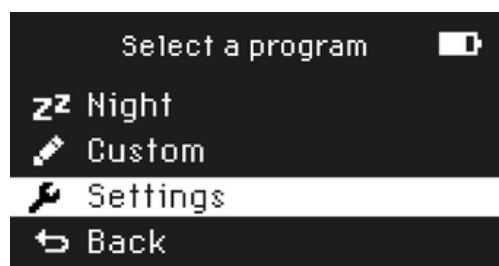

Zapnutí/vypnutí zvuku


Pomocí ovladače zvýrazněte položku Zvuk (Sound).

Stisknutím ovládacího voliče zapnete/vypnete zvuk.

Když je zvuk vypnutý, na konci relace PEMF se nepřehraje žádný zvuk, který by signalizoval uživatele.

Pomocí ovladače přejděte na položku Potvrdit (Confirm) a stisknutím ovladače uložte změny.

Tyto změny budou zapamatovány.

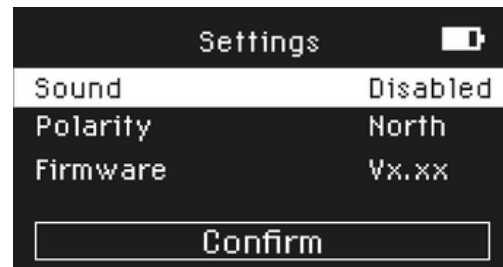

Změna polarity


Změna polarity magnetických polí v nabídce Nastavení změní směr magnetického pole kolem podložky.

Pro polaritu jsou k dispozici 3 možnosti; Sever, Jih a Alt (střídavě).

Standardně je zadní strana CELLER8® nastavena na sever.




Při použití podložek CELLER8® je šedá strana podložky CELLER8® standardně nastavena na sever.

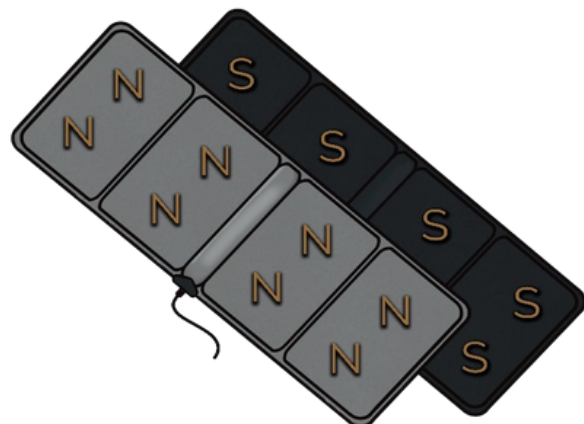

Chcete-li změnit polaritu, v nabídce Nastavení pomocí ovladače zvýrazněte Polaritu.

Stisknutím ovladače změníte polaritu.

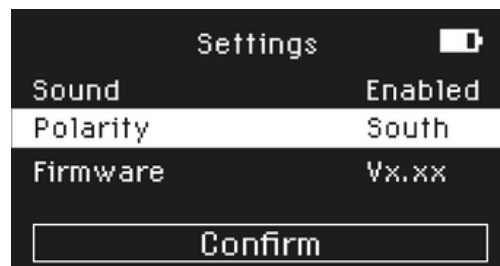

Pomocí ovladače přejděte na položku Potvrdit (Confirm) a stisknutím ovladače uložte změny.




Když je polarita přepnuta na jih, zadní strana CELLER8® bude jižní.



Když je polarita nastavena na Alt (střídavě), polarita v CELLER8® se bude každou minutu přepínat mezi severem a jihem, střídavě z obou stran CELLER8®.

POZNÁMKA: Nastavení polarity, ve kterém byl CELLER8® naposledy použit před vypnutím zařízení, bude platit při příštím zapnutí zařízení zůstanou na místě.

Když je polarita přepnuta na jih, bude šedá strana podložky CELLER8® jih.

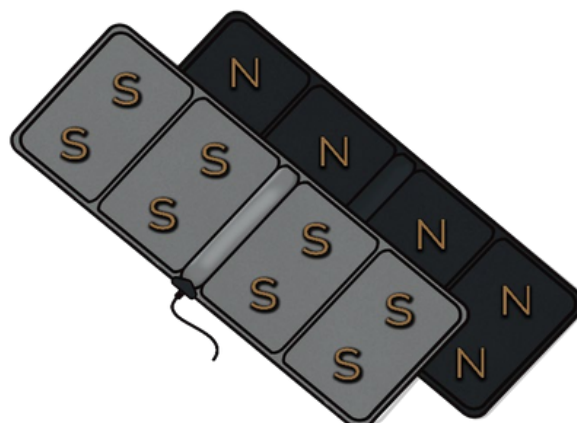

Když je polarita nastavena na Alt (střídavě), polarita v podložce CELLER8® se každou minutu přepne mezi severem a jihem, přičemž se bude střídát z obou stran podložky CELLER8®.

POZNÁMKA: Nastavení polarity podložky CELLER8® je řízeno nastavením polarity na podložce CELLER8®. Polarita podložky CELLER8® se po zapojení automaticky změní tak, aby odpovídala polaritě zařízení CELLER8®.

O programech CELLER8®

CELLER8® má na výběr 4 přednastavené programy:

- Ranní
- Večerní
- Meditační
- Noční

Případně se můžete rozhodnout pro vlastní program.

Ranní program (12 Hz až 30 Hz, zvyšování každých 5 sekund)

Ranní program využívá řadu frekvencí speciálně pro aplikaci v dřívější části dne. Frekvence se každých 5 sekund zvýší o 1 Hz, což bude mít v jedné relaci dobrý rozsah různých frekvencí.

Ranní program byl navržen tak, aby pomohl s bdělostí, koncentrací, soustředěním a zotavením.

Večerní program (8 Hz & 10 Hz, každou minutu)

Večerní program běží 8 Hz a 10 Hz, střídá se každou minutu.

Večerní program je určen pro relaxaci, regeneraci nebo jako přírodní wellness program.

Meditační program (od 8 Hz do 4 Hz, snížení každých 30 sekund)

Meditační program běží od 8 Hz a každých 30 sekund klesá, dokud nedosáhne 4 Hz. Po 30 sekundách se frekvence vrátí na 8 Hz a proces se bude opakovat až do konce relace.

Meditační program byl navržen tak, aby pomohl nalézt velmi uvolněný stav mysli, podobný tomu v hluboké meditaci.

Noční program (od 4 Hz do 1 Hz, více než 10 minut)

Noční program běží od 4 Hz a během 10 minut se sníží na 1 Hz. Po 10 minutách se frekvence vrátí na 4 Hz a proces se bude opakovat až do konce relace.

Noční program byl navržen pro použití před spaním. V tomto režimu jej lze využít až 12 hodin, ale ve výchozím nastavení je nastaveno na 2 hodiny. Světla zařízení v tomto režimu ztlumí a zvuk bude deaktivován, i když je na CELLER8® zvuk vybrán jako povolený. Je to proto, aby zařízení neprobudilo uživatele, když program skončí.

Vlastní program (1 Hz – 100 Hz)

Vlastní program poběží pouze na zvolené frekvenci po dobu trvání zvoleného času/intenzity. Frekvenční rozsah na výběr je mezi 1 – 100 Hz.

Péče a údržba zařízení

Čištění produktů CELLER8®

POZOR: Produkty CELLER8® by se měly otřít pouze neabrazivním hadříkem. Použití čisticích technik nebo produktů neschválených výrobcem může vést ke ztrátě výkonu a poškození podložky CELLER8® nebo CELLER8®.

POZOR: Za žádných okolností nesmí být podložka CELLER8® nebo CELLER8® ponořena nebo postříkána kapalinou.

Skladování produktů CELLER8®

Vždy skladujte CELLER8® na chladném a suchém místě.

POZOR: Nikdy neskladujte podložku CELLER8® nebo CELLER8® ve vozidle za chladného nebo horkého počasí. Viz technické specifikace pro rozsahy skladovacích teplot a vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neskladujte CELLER8® delší dobu s vybitou baterií.

Odstraňování problémů

Programy neběží podle očekávání

Pokud se při provozu CELLER8® vyskytne problém, nejprve zařízení vypněte a poté znovu zapněte. To umožní, aby se programování restartovalo a samo se resetovalo. Dále se ujistěte, že je zařízení dostatečně nabité.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým zákaznické péče CELLER8®.

Výstražné obrazovky

Nabíjení baterie

Když je CELLER8® vypnutý a zapojený do sítě, na obrazovce se zobrazí animovaná baterie, která značí, že se baterie nabíjí.



Vybitá baterie


Obrazovka Slabá baterie se zobrazí, když zařízení nemá dostatek baterie pro provoz. V tomto případě musí být zařízení před použitím nabito na dostatečné množství.



Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte tým CELLER8® Customer Care Team.

Mat Not Detected

Obrazovka Mat Not Detected se zobrazí, když byla před připojením CELLER8® Mat vybrána aplikace využívající CELLER8® Mat. Pro výběr aplikace se ujistěte, že je podložka CELLER8® připojena.

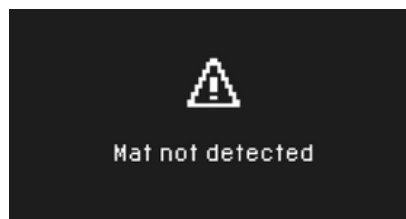

Tato obrazovka se také může zobrazit, pokud připojení není zabezpečené. Odpojte prosím podložku CELLER8® a znovu ji připojte.


Pokud podložka CELLER8® stále není detekována, zkuste prosím CELLER8® vypnout a znovu zapnout, abyste resetovali programování.

Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte tým CELLER8® Customer Care Team.

Technické informace CELLER8®

Umístění podložky CELLER8® a CELLER8®

CELLER8® a CELLER8® Mat se skládají z měděných cívek, které generují magnetické pole. K nabuzení cívky k vytvoření pulzního elektromagnetického pole se používá frekvenční generátor. 1 velkou měděnou cívku lze nalézt v CELLER8® a 12 měděných cívek lze nalézt v CELLER8® Mat, aby bylo zajištěno nejlepší pokrytí magnetických polí.

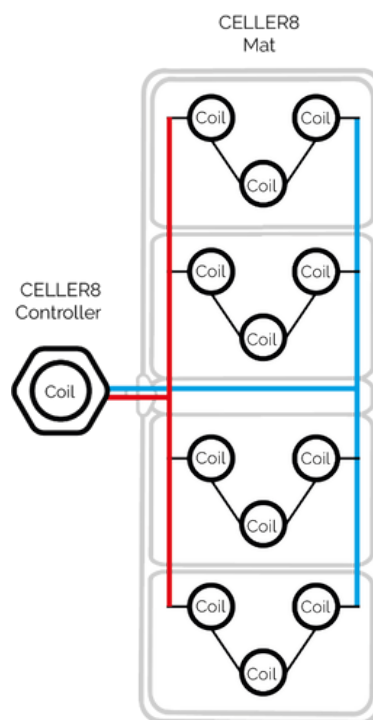

Technická specifikace podložky CELLER8® + CELLER8® Mat






















Rozsah intenzity	1 G - 100 G (Gauss) 0,1 mT - 10 mT (Milli-Tesla) 100 µT - 10 000 µT (Micro-Tesla)
Frekvenční rozsah	1 – 100 Hz
Programy	5 (včetně Custom)
Aplikace	CELLER8® Mat, CELLER8® a CELLER8® + CELLER8® Mat
Počet cívek	CELLER8®: 1 CELLER8® Mat: 12
Polarita	Sever, Jih a střídání (volitelné uživatelem)
Průběh	Čtvercová vlna
Záruka	CELLER8®: 3 roky CELLER8® Mat: 1 rok
Zdroj napájení	Provoz na baterie a síť
Rozměry	CELLER8®: 14 cm x 14 cm x 4 cm CELLER8® Mat: 49 cm x 173 cm x 2 cm
Modely a číslo dílu	CELLER8
Doba provozu	CELLER8® 420 minut při spuštění ranního programu 44 hodin při spuštění nočního programu (Při provozu s plnou baterií a spuštění programu na CELLER8® při výchozí intenzitě).
	CELLER8® a CELLER8® Mat 100 minut při spuštění ranního programu 36 hodin při spuštění nočního programu (Při provozu s plnou baterií a spuštění programu na podložce CELLER8® i CELLER8® s výchozí intenzitou).
Kompletní doba nabíjení baterie	< 5 hodin
CELLER8® Pohotovostní doba, když se nepoužívá	> 1 rok
Operátor	Koncový uživatel
Provozní teplota	15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)
Provozní vlhkost	20 - 80 % RH (bez kondenzace)
Skladovací a přepravní teplota	0 – 50 °C (32 °F – 122 °F)
Skladování a přeprava Vlhkost	10 - 95 % RH (bez kondenzace)

Hmotnost	CELLER8®: 240 g Napájení: 160 g CELLER8® Mat: 3,75 kg
Nabíjecí baterie	RRC1120 Li-ion 3,6 v 2,35 aH
Externí napájecí zdroj	XP Power VEP24US24 Vstup: 100 - 240 V – 0,6 A, 50 / 60 Hz Výstup: 24 V – 1,0 A XP Power ACM24US24 Vstup: 100 – 240 vAC < 0,6 A, 50 / 60 Hz Výstup: 24 v DC > 1,0 A
















Technická specifikace popruhu CELLER8®

Materiály	Nylon Multi_lament 25 % Nylon Mono_lament 50 % Elastan 25 %
Rozměry	100 cm x 7,5 cm
Hmotnost	65 g

Seznam symbolů CELLER8®

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Zpět		CELLER8® program
	Baterie		Baterie je plná
	Baterie je prázdná		Baterie je prázdná
	Šestihran CELLER8®		Meditační program
	Vlastní program		Ranní program
	Večerní program		Noční program
	CELLER8® Podložka + CELLER8® program		CELLER8® Podložka program
	Podložka nebyla nalezena		Procento
	Severní polarita		Jižní polarita
	Probíhá program		Program dokončen
	Nastavení		

Seznam symbolů na obalů

Symbol	Popis
	Výrobce
IPX0 – nechráněno proti vniknutí vody	IPX0 – není chráněno proti vniknutí vody
	Stejnoseměrný proud
	Značka CE
	Uchovávejte v suchu
	Před použitím si přečtěte pokyny
	Sériové číslo
	UDI číslo
	Likvidujte podle OEEZ
	Spotřebič třídy III pro použití se samostatným externím napájecím zdrojem s velmi nízkým napětím
	Logo výrobce
	Distribováno logem
	Obecný symbol pro obnovu/recyklovatelnost
	UKCA
	Omezení vlhkosti
	Teplotní limit

Informace o záruce a vrácení

Na zařízení CELLER8® se poskytuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 3 let pro CELLER8® a 1 rok pro CELLER8® Mat, počínaje datem nákupu, při běžném používání. Tato záruka platí výhradně pro původního kupujícího, pokud byl produkt zakoupen přímo prostřednictvím CELLER8® nebo u autorizované pobočky, distributora či prodejce CELLER8®.

Pokud se domníváte, že je produkt v záruční době vadný, kontaktujte tým zákaznické podpory CELLER8® nebo místního autorizovaného distributora či prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

CELLER8® si vyhrazuje právo posoudit, zda je produkt vadný a má nárok na záruční výměnu, a v takovém případě nahradit vadný produkt nejvíce srovnatelným, aktuálně dostupným modelem. K uplatnění záruky je nutné předložit doklad o platném nákupu. Podmínky služby a podrobné informace o záruce najdete na webových stránkách CELLER8® na adrese www.celler8.com.

Pro získání správné zpáteční adresy se obraťte na autorizovaného prodejce, u kterého jste zařízení CELLER8® zakoupili. Zařízení vrácená přímo na adresu výrobce se mohou ztratit a tím zanikne možnost přiřazení reklamace ke konkrétnímu zákazníkovi, proto je nutné nejprve kontaktovat prodejce, kde jste zařízení zakoupili, a získat správnou zpáteční adresu.

Zlikvidujte zařízení CELLER8® v souladu se směrnicí WEEE. Nikdy nevyhazujte žádná elektronická zařízení nebo baterie do běžného komunálního odpadu. Na konci životnosti produktu kontaktujte tým zákaznické podpory CELLER8® nebo jeho distributora pro pokyny k likvidaci.



Odpovědný výrobce a kontakty

Pro podporu a opravy pro CELLER8® kontaktujte místního distributora.

Kontaktní údaje:

Telefon: +44 (0) 1622 854864

E-mail: office@celler8.com

Web: www.celler8.com

Distribuce: NewMed Ltd
Station Yard, Station Road,
Harrietsham,
Maidstone, Kent,
ME17 1JA
Spojené království
www.newmedltd.co.uk
info@newmedltd.co.uk
0808 1689 282

Výrobce Bedfont® Scientific Ltd.
Station Yard, Station Road,
Harrietsham,
Maidstone, Kent,
ME17 1JA
Spojené království
www.bedfont.com
ask@bedfont.com
0044 (0)1622 851122

Upozornění: Informace obsažené v této příručce slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a pocházejí z našich vlastních zkušeností. Produkt si nečiní nárok na diagnostiku, léčbu, léčbu nebo prevenci jakýchkoli zdravotních stavů. Vždy se poraďte se svým lékařem.



E-mail: office@celler8.com
Telefon: +44 (0) 1622 854864



Bedfont® Scientific Ltd. Station
Road, Harrietsham,
Maidstone, Kent,
ME17 1JA Anglie



NewMed Ltd.
Station Road, Harrietsham,
Maidstone, Kent ME17 1JA
Anglie
Tel: +44 (0) 1622 854864.
E-mail: office@celler8.com
www.celler8.com

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Vydání 4 – srpen 2024, číslo dílu: LAB875
Bedfont® Scientific Limited si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat
literaturu bez předchozího upozornění.
Registrováno: Anglie a Wales. Registrované číslo: 1289798

